



Alkoholfreie, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

- » geruchsneutral und alkoholfrei
- » auch als Schaum applizierbar
- » kurze Einwirkzeit, hoher Reinigungseffekt

VAH

ventides GF ist ein gebrauchsfertiges, alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Aufgrund seiner hohen Materialverträglichkeit ist es besonders für alkoholempfindliche Materialien wie Acrylglas und Medizinprodukten wie beispielsweise Ultraschallgeräte geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen und medizinischem Inventar.

Anwendung:

Flächen mit ventides GF bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Zusammensetzung:

100 g enthalten:
0,5 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von ventides GF wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten		30 Sek.	1 Min.	2 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		■	
Begrenzt viruzid gem. EN 14476	niedrige und hohe Belastung		■	
Ergänzende Prüfergebnisse:				
Wirksam gegen Papova/SV40-Viren gem. EN 14476	hohe Belastung			■

BAuA Reg.Nr. N-49576

Verfügbare Gebindegrößen	REF	PZN	Stück / Karton	Stück / Palette
500 ml Flasche	508005	10921675	20 Flaschen	900 Flaschen
1 Liter Flasche	508010	06920799	10 Flaschen	600 Flaschen
5 Liter Kanister	508050	06920813	3 Kanister	96 Kanister



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2024-10