



Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- » alkoholfrei
- » grundlegende, schnelle Wirksamkeit
- » für mittelgroße Oberflächen von Medizinprodukten

VAH

ventides GF wipes sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zu schneller Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. Die Tücher zeichnen sich durch eine Haltbarkeit von 90 Tagen nach dem Anbruch der Packung aus. ventides GF wipes ermöglichen insbesondere bei der Desinfektion und Reinigung von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Sie sind alkoholfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole.

ventides GF wipes eignen sich durch ihre großen Tücher besonders zur Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen im Bereich der Routine. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen, nichtinvasiven Medizinprodukten, sowie Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen.

Gem. Biозidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Flächen mit Schnelldesinfektionstüchern bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise:

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 90 Tage

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrene (ABS), Polycarbonate (PC).

Bei folgenden Materialien Herstellerangaben beachten: Kunstleder.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten		1 Min.	2 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	■	
Begrenzt viruzid gem. EN 14476	niedrige und hohe Belastung	■	
Ergänzende Prüfergebnisse:			
Wirksam gegen Papova-/SV40-Viren gem. EN 14476	hohe Belastung		■

BAuA Reg.Nr. N-70161

Verfügbare Gebindegrößen	REF	PZN	Stück / Karton	Stück / Palette
100 Blatt (ca. 20×22 cm)	208T100	19440411	6 Packungen	270 Packungen



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2025-01