



## Alkoholische Tücher zur Flächen-Schnelldesinfektion

- » rückstandsfreie Abtrocknung
- » Wahlweise parfümfrei oder mit angenehmem Duft
- » Umfassende, schnelle Wirksamkeit, begrenzt viruzid PLUS

VAH IHO

ventisept wipes RTU sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen in patientennahen Bereichen. ventisept wipes RTU bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus dem gewohnten Vlies-tuchspender mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

### Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

### Anwendung:

Flächen mit ventisept wipes RTU bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Anwendungshinweise:

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage

### Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

### Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET). Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kupfer, Messing.

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum		30 Sek.	1 Min.	3 Min.	5 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung				■
Tuberkulozid gem. EN 14348	niedrige Belastung	■			
Mykobakterizid gem. EN 14348	niedrige Belastung		■		
Begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476	niedrige Belastung			■	
Begrenzt viruzid gem. EN 14476	niedrige und hohe Belastung		■		
Ergänzende Prüfergebnisse:					
Wirksam gegen Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476	niedrige Belastung		■		
Wirksam gegen Adeno-Viren gem. EN 14476	niedrige Belastung			■	

UFI: 7P00-D06P-900W-CH1V  
BAuA Reg.Nr. N-78269

Verfügbare Gebindegrößen	Duftrichtung	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept wipes RTU 70 Blatt (25×25 cm)	pur	323070P	3 Rollen	288 Rollen
	pink grapefruit	323070G		
	honigmelone	323070H		
ventisept wipes RTU 90 Blatt (30×25 cm)	pur	323090P		150 Rollen
	pink grapefruit	323090G		
	honigmelone	323090H		



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Stand der Information: 2025-01