

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

- ✓ VAH-gelistet
- ✓ auch als Schaum applizierbar, geruchsneutral
- ✓ kurze Einwirkzeit, hoher Reinigungseffekt

ventides GF ist ein gebrauchsfertiges, alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Aufgrund seiner hohen Materialverträglichkeit ist es besonders für alkoholempfindliche Materialien wie Acrylglas und Medizinprodukten wie beispielsweise Ultraschallgeräte geeignet.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Anwendungsgebiete:

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung: Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen und medizinischem Inventar.

Anwendung:

Flächen mit ventides GF bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von ventides GF wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polycarbonat (PC).

Zusammensetzung:

100 g enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Besondere Hinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615	1 Min.*
Begrenzt viruzid gem. EN 14476	1 Min.
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Rotaviren gem. RKI/DVV	30 Sek.
Wirksam gegen Papova-/SV40-Viren gemäß EN 14476	2 Min.

* gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste

Zulassung und Listungen:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. **N-49576**.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der Desinfektionsmittelliste der IHO (Gesundheitswesen).

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Verfügbare Gebindegrößen	REF	Stück / VE	Stück / Palette
500 ml	508005	20 Flaschen	900 Flaschen
1000 ml	508010	10 Flaschen	600 Flaschen
5000 ml	508050	3 Kanister	96 Kanister

CE 0482

MD

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de