

Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- ✓ parfüm- und alkoholfrei
- ✓ für den Einsatz im Lebensmittelbereich und auf Acrylglas geeignet
- ✓ aldehyd- und phenolfrei

ventisept F ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. ventisept F ist parfümfrei, enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus. ventisept F ist hervorragend geeignet zur Oberflächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen in der Lebensmittelverarbeitung und in Großküchen. Es ist besonders geeignet für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. ventisept F hat eine gute Materialverträglichkeit und ist auch für Acrylglas geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven, alkoholempfindlichen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Anwendung:

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Oberfläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten ventisept F Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).

In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Desinfektion im Lebensmittelbereich: Im Lebensmittelbereich nach der Einwirkzeit mit ausreichend Trinkwasser gründlich nachspülen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 6,66 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von ventisept F wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrene (ABS), Polycarbonate (PC).

Die Anwendung von ventisept F ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Linoleum, Chloropren, Ethylene-Propylene-Dienmonomer (EPDM).

Gefahr:

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride; Didecyldimethylammoniumchlorid; Alkohole, C9-11, verzweigt, ethoxiliert.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615

7,5%	1 Min.*
2,5%	15 Min.
1,0%	60 Min.

Begrenzt viruzid gem. EN 14476

7,5%	1 Min.
2,0%	15 Min.
1,0%	60 Min.

Ergänzende Prüfergebnisse:

Wirksam gegen SV40/Papovaviren gem. EN 14476

5,0%	5 Min.
2,0%	30 Min.

Wirksam gegen Rotaviren gem. RKI/DVV

0,5%	1 Min.
------------	--------

*gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste

Einwirkzeiten gem. DVG-Richtlinien: siehe DVG-Liste (www.dvg.net).

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH und des DVG.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-108570

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

UFI: QHJ0-E0K3-F006-S7TX

Verfügbare Gebindegrößen

REF

PZN

Stück / Karton

Stück / Palette

ventisept F 1000ml
Dosierflasche

204528

06921043

10 Flaschen

320 Flaschen


ventisept F 5000ml
Kanister

204523

06921066

3 Kanister

96 Kanister

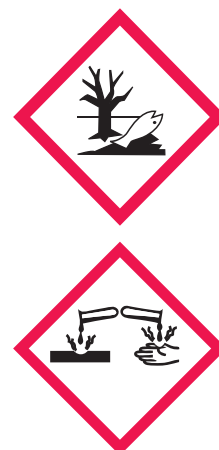

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Stand der Information: 2022-10

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de