

Alkoholische Flächen-Schnelldesinfektion

- ✓ VAH gelistet
- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung, mit angenehmem Duft
- ✓ umfassende Wirksamkeit

Ventisept Honigmelone ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept Honigmelone trocknet rückstandsfrei ab und überzeugt mit einem frischen Duft.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. ventisept honigmelone kann als Wischdesinfektion oder mit einer Sprühapplikation verwendet werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol, enthält Duftstoffe.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethylenterephthalat (PET).

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter aus-spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammel-stelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sach-kunde gem. nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektren und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid levurozid gem. VAH / EN 16615	5 Min.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 Min.
Begrenzt viruzid	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	5 Min.
Wirksam gegen Rotaviren	30 Sek.
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	5 Min.
Wirksam gegen Adenoviren	5 Min.

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der baua unter der Reg.-Nr. N-78264

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



Verfügbare Gebindegrößen	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept honigmelone 1000ml	323010H	10 Flaschen	600 Flaschen
ventisept honigmelone 5000ml	323050H	3 Kanister	96 Kanister



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2022-11

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de