

Alkoholische Schnelldesinfektion

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ mit angenehmem Duft
- ✓ umfassende Wirksamkeit

Ventisept Pink Grapefruit ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept Pink Grapefruit trocknet rückstandsfrei ab und überzeugt mit einem frischen Duft.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht-invasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Ventisept Pink Grapefruit kann als Wischdesinfektion oder mit einer Schaumsprühapplikation verwendet werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol, enthält Duftstoffe.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethylenterephthalat (PET).

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	30 Sek.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 Min.
Begrenzt viruzid	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	5 Min.
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Rotaviren	30 Sek.
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	1 Min.
Wirksam gegen Adenoviren	5 Min.

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH. Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de). Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-78265

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



ACHTUNG

Verfügbare Gebindegrößen	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept pink grapefruit 1000ml	323010G	10 Flaschen	600 Flaschen
ventisept pink grapefruit 5000ml	323050G	3 Kanister	96 Kanister

CE 0482

MD

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Orstring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de