

Alkoholische Schnelldesinfektion

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ geeignet für den Lebensmittelbereich
- ✓ umfassende Virenwirksamkeit inklusive Corona- und Noro-Viren (MNV)

Ventisept Pur ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept Pur trocknet aufgrund seiner parfüm- und farbstofffreien Eigenschaften rückstandsfrei ab und ist daher ideal für den Lebensmittelbereich geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

Anwendung:

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. ventisept pur kann als Wischdesinfektion oder mit einer Sprühapplikation verwendet werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH / EN 16615	5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	30 Sek.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 Min.
Begrenzt viruzid	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	5 Min.
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Rotaviren	30 Sek.
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	1 Min.
Wirksam gegen Adenoviren	5 Min.

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-77396

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethylenterephthalat (PET).

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

ACHTUNG



Verfügbare Gebindegrößen

	REF	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept pur 1000ml	323010P	10 Flaschen	600 Flaschen
ventisept pur 5000ml	323050P	3 Kanister	96 Kanister

MD
Medizinprodukt

CE 0482

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de