

AUFBEREITUNG VON WANDSPENDERN

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens (Stand: 2016):

Die manuelle Aufbereitung beinhaltet konstruktionsabhängig folgende Schritte:

- ✓ Abwischen des Steigrohrs mit Einmaltuch
- ✓ Reinigung der Dosierpumpe unter fließendem, heißen Wasser
- ✓ Trocknen
- ✓ Reinigung des Spendergehäuses unter fließendem, heißen Wasser
- ✓ Trocknen
- ✓ Wischdesinfizieren von Spendergehäuse, Rückwand und Dosierpumpe
- ✓ Zusammensetzen des Spenders und wiederholtes Durchpumpen eines Desinfektionsmittels

**BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE HERSTELLERANGABEN ZUR
AUFBEREITUNG DES WANDSPENDERS.**

Unsere Touchless- Spender sind grundsätzlich wartungsfrei. Lediglich die Einweg-Rollerpumpen sollten regelmäßig (je nach Häufigkeit der Benutzung alle 3 - 4 Monate) und die Batterien nach ca. zwei Jahren getauscht werden.

Ansonsten sollten die Spender für eine möglichst lange Verwendungsdauer pfleglich behandelt werden – in der Regel reicht es, die Spender mit einem feuchten, in warmes Seifenwasser getauchten, Tuch abzuwischen und regelmäßig zu desinfizieren.



Reinigen Sie das Gehäuse der manuellen Wandspender nur mit mildem Reinigungsmittel. Falls gewünscht, mit Flächen-Desinfektionsmittel nachbehandeln. Das Gehäuse kann auch in einer geeigneten Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Die Reinigung der Pumpe wird nicht empfohlen. Damit die Entstehung von Hygienemängeln bei der Aufbereitung von vornherein vermieden wird, verwenden Sie die Kunststoffpumpen als Ersatzteil.

**FÜR DIE DESINFEKTION DER SPENDER
EMPFEHLEN WIR
VENTIDES GF.**