

# Desinfektionsmittel für Absauganlagen

- ✓ gute Reinigungseigenschaften
- ✓ besonders schaumarm eingestellt
- ✓ für Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider

**ventimed forte** ist ein Präparat zur Desinfektion, Reinigung und Pflege aller Absauganlagen auf der Basis von materialschonenden quartären Ammoniumverbindungen. Die regelmäßige Anwendung von **ventimed forte** gewährleistet eine hygienisch einwandfreie Absauganlage sowie einen störungsfreien Betrieb.

**ventimed forte** enthält keine Aldehyde oder Phenole und ist aktivchlorfrei. Daher ist es besonders für die schonende Desinfektion und Pflege von Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider geeignet.

## Anwendung:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung 20 ml Konzentrat in 1 Liter heißem Wasser (mind. 40-60 °C) lösen und direkt absaugen. Desinfektionsmittel nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.

## Hinweis:

Zur Vorreinigung von Absauganlagen vor der Verwendung von **ventimed forte** empfiehlt sich der Einsatz von einem Intensivreiniger. **ventimed forte** entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (s. TRGS 525/406).

## Umweltverträglichkeit:

**ventimed forte** kann in verdünnter Form als Gebrauchslösung nach Verwendung dem Abwasser zugeführt werden. Remobilisiert keine Schwermetalle wie Quecksilber aus dem Amalgam, da chlorfrei.

## Wichtig:

**ventimed forte** enthält alle zur Pflege der Absauganlagen nötigen Bestandteile, deshalb nicht mit Zusätzen oder anderen Präparaten mischen.

## Anwendungsgebiete:

Desinfektion, Reinigung und Pflege aller Absauganlagen. Die regelmäßige Verwendung von **ventimed forte** gewährleistet eine hygienisch einwandfreie Absauganlage sowie einen störungsfreien Betrieb.

## Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

6 g N-Decyl-N-isononyl-N,N-dimethylammoniumchlorid.

## Gefahr:

N-Decyl-N-isononyl-N,N-dimethylammoniumchlorid.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

## Wirkspektren und Einwirkzeiten:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid

2,0% ..... 15 Min.

1,0% ..... 30 Min.

wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/BVDV sowie Vaccinia-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung)

2,0% ..... 15 Min.

Verfügbare Gebindegröße

5 Liter

REF

106223

PZN

06920983



## Zulassung und Listungen:

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nur zur professionellen Anwendung, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

CE 0482

## Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de